

# Endre IMEI/serienummer for medisindispenser i NetNordic responscenterløsningen

For operatører (3. utgave)



# Innhold

---

1	Veiledning.....	2
---	-----------------	---

# 1 Veiledning

1. Søk opp EPJ nummer som vanlig, enten ved opprett alarm eller under tjenestemottakere for å finne navn på TM.
2. Gå inn på «Utstyrliste» og trykk deg inn på enheten. Viktig at det er riktig medisindispenser du velger.

OBS!! TM kan ha flere enheter knyttet til seg.

3. IMEI-nummer (Medido) Serienummer (Karie og Pilly) skal føres inn under Alarm ID:

**REDIGER UTSTYR**

Modell  
Dignio Medido

Alarm ID  
012497009014345

Status  
Aktiv

Ved å trykke på linjen med alarm ID får du mulighet til å redigere nummeret

4. Tast inn nytt IMEI/serie-nummer og trykk «Lagre» når dette er oppdatert.

5. Testing:

Medido:

For å sikre at innstillingene er korrekte; ring HT og be de logge seg inn for å teste varslingskjeden i DP. Meldingen «Medisin ikke tatt» vil da bli sendt.

Karie:

For å sikre at innstillingene er korrekte; ring HT og be de logge seg inn for å teste varslingskjeden ved å trykke på send testvarsel i DP. Varselet «karie: testvarsel» vil da bli sendt.

Pilly:

Testing av varslingskjede er ikke mulig. Avtal med HT at de ikke skrur av SMS varslingskjede til telefonen i Dignio Prevent før de ser at varslene kommer inn på NNO mobil app.